

MASCHERINA FILTRANTE MONOUSO

Prodotta e messa in commercio in forza dell'articolo 16 secondo comma del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18

AVVERTENZE E MODALITA' D'IMPIEGO

La mascherina filtrante monouso contenuta in questa confezione:

- Non è un "dispositivo medico chirurgico", né un "dispositivo di protezione individuale (DPI)" di cui all'articolo 74, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed altre norme applicabili a tali dispositivi, ivi incluso l'art. 16, primo comma, del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18;
- Non è adatta all'uso per i bambini sotto i 3 anni di età;
- Non garantisce la protezione dei suoi utilizzatori dal contagio da agenti patogeni, né garantisce il mancato contagio da agenti patogeni a soggetti terzi;
- L'articolo va prelevato singolarmente con le mani pulite, indossato sul viso inserendo i padiglioni auricolari all'interno delle fessure presenti alle estremità laterali secondo la propria grandezza/geometria del viso.
- Può essere indossato solo per brevi periodi;
- Non deve essere disperso nell'ambiente, ma depositato subito dopo l'uso in contenitori chiusi da gettare nella frazione "secco non riciclabile"

Si raccomanda comunque l'osservanza di tutte le disposizioni e raccomandazioni emanate di tempo in tempo dalle autorità in relazione agli usi e smaltimento delle mascherine monouso





